
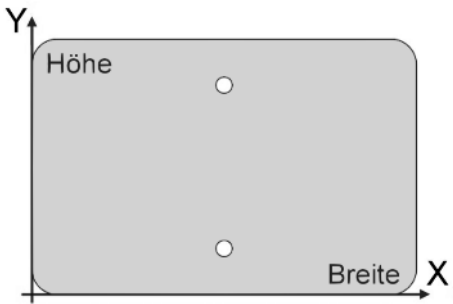


jonas-care®	Produktdatenblatt	fix_produktdatenblatt_2020_03 Gültig ab: 13.12.2020
	FIX-Plate	Zolltarifnr.: 3921.9010

Anwendung / Ausführung:

Die CNC-gefertigten FIX-Plates dienen als Zubehörteil der UNI-Universalhalter. Mit diesen PLEXIGLAS-Anbauplatten ist die lösbare Befestigung von beliebigen Produkten, wie z.B. Smartphones, Tablets, Fernbedienungen, Buchstützen ... usw. möglich. Die Lieferung der FIX-Plates erfolgt inklusive einem V2A-Befestigungsset für den UNI-Montageadapter und selbstklebende Klettunkte. Die FIX-Plates können auch 90° gedreht (Hoch- anstatt Querformat) verwendet werden. Für Smartphones oder Tablets empfiehlt es sich, die Klettunkte auf eine Smartphone- oder Tablet-Hülle zu kleben.

Set-Komponenten:

	FIX-Plate PLEXIGLAS-Anbauplatte (4-5mm stark)	
	V2A-Befestigungsset 2x Senkkopfschraube M6x20 2x Unterlagscheibe M6 2x Selbstsichernde Mutter M6	
	Klettunkte Selbstklebende Klettunkte (weiß + schwarz, Flausch- und Hakenteil).	

FIX-Plate Varianten: X= Breite / Y= Höhe Diese Variantenübersicht kann durch andere Größen ergänzt werden.

71-01	FIX-Plate: Breite 6cm , Höhe: 12cm (vorw. für Smartphone, Fernbedienungen, etc.)
71-02	FIX-Plate: Breite 15cm , Höhe: 10cm (vorw. für Tablet, etc.)
71-03	FIX-Plate: Breite 25cm , Höhe: 10cm (vorw. für Tablet & Smartphone, etc.)
71-99	FIX-Plate: Breite XXcm , Höhe: YYcm (individuell, kundenspezifisch max.30cm für X/Y)

Klettunkte anbringen:

FIX-Plate und das Produkt müssen vor dem Bekleben sauber und fettfrei sein. Schneiden Sie die gewünschte Menge und Farbe an Flausch- und Hakenteilen aus dem Trägerblatt einzeln aus. Setzen Sie nun die Flausch- und Hakenteile (noch mit Schutzfolie) 1:1 deckungsgleich paarweise übereinander, so dass sie aneinander haften. Nun entfernen Sie die Schutzfolie eines Flauschteiles und kleben es auf die gewünschte Stelle am Produkt (ohne Flausch- und Hakenteil zu trennen). Nun mit allen weiteren Flauschteilen gleichermaßen verfahren. Wenn alle Klettunkte gesetzt sind, entfernen Sie die Schutzfolie aller Hakenteile. Danach platzieren Sie das Produkt vorsichtig an die gewünschte Stelle vom FIX-Plate (kontrollieren Sie Position nochmals genau) und drücken es dann fest gegen das FIX-Plate. Nun sind FIX-Plate und Produkt lösbar über die Klettunkte miteinander verbunden. Die Klettunkte können jederzeit wieder entfernt werden und eventuelle Kleberückstände lassen sich problemlos mit einem handelsüblichen Etikettenlöser-Spray entfernen.

Gewährleistung / Verwendungsdauer / Wartung:

Die Gewährleistungszeit beträgt 24 Monate. Die typische Verwendungsdauer beträgt ca. 10 Jahre. Eine Wartung der FIX-Plates ist nicht erforderlich.

Reinigung / Desinfektion:

Verwenden Sie zur Reinigung der Universalhalter nur ein angefeuchtetes Tuch. Lösungsmittel, Putz- und Scheuermittel sowie Alkohol (Spiritus) sind nicht erlaubt. Zur professionellen Desinfektion empfehlen wir eine Wischdesinfektion mit einem mikrobiologischen Universalreiniger. Z.B.: HygieneProtect Universalreiniger Art.Nr.: 700110 bzw. 7011; Vertrieb durch: www.wgp-shop.de